



PREPARAT ZŁOŻONY
O TRWAŁYM DZIAŁANIU BAKTERIOSTATYCZNYM
PRZEZNACZONY
DO PŁUKANIA KANAŁÓW ZĘBOWYCH
W TRAKCIE LECZENIA ENDODONTYCZNEGO



WYTWÓRCA / SPRZEDAŻ:

DENTAL NANOTECHNOLOGY sp. z o.o.
40-534 Katowice, ul. Czajek 5
tel. 032 204 56 35, tel./fax 032 205 16 58
e-mail: info@dentalnt.com

KONFEKCJONOWANIE: Jelfa SA

www.dentalnt.com

Pierwszy preparat w stomatologii
na bazie nanosrebra wzbogacony o nanozłoto.

Udowodniona naukowo –
bardzo wysoka – 99% skuteczność
zwalczania bakterii i grzybów.
Prosty i wygodny w aplikacji preparat złożony.

Jest to preparat złożony o skutecznym i trwałym działaniu bakteriostatycznym, służący do końcowego przepłukiwania kanałów korzeniowych w trakcie leczenia endodontycznego.

NANOCARE PLUS Silver Gold

oparty jest o nanocząstki srebra i złota.

Został on opracowany w oparciu o istniejące doświadczenia z preparatami zawierającymi nanocząstki.

Zarówno srebro jak i złoto było stosowane w stomatologii od dawnych czasów. Srebrne ćwieki wypełniające kanały korzeniowe uniemożliwiały rozwój infekcji pomimo obecności bakterii.

Wadą była skłonność do korozji i utraty właściwości fizyko-chemicznych.

Również złoto stosowane w stomatologii znane jest z właściwości bakteriostatycznych.

Założeniem było opracowanie płynu uzupełniającego dotychczasowe procedury czyszczenia kanałów korzeniowych.

Mechaniczne opracowanie kanałów głównych pozwala na penetrację substancji płuczących do systemu kanałów korzeniowych.

Wykorzystanie bakteriobójczych i proteolitycznych właściwości podchlorynu sodu pozwala na usunięcie większości substancji organicznych z systemu kanałów korzeniowych.

Preparat NANOCARE PLUS Silver Gold umożliwia dodatkowe wypłukanie resztek organicznych oraz dzięki właściwościom nanosrebra i nanozłota utrudnia ponowną kolonizację systemu kanałów korzeniowych przez bakterie.

Brak zjawiska korozji w odniesieniu do nanocząstek srebra i złota oraz ich minimalne stężenie w płynie płuczącym nie wpływa negatywnie na ostateczne wypełnienie kanałów korzeniowych.

„Informacje o właściwościach preparatu, uzyskane na podstawie badań laboratoryjnych, jak również wyniki kliniczne, pozwalają sądzić, że NANOCARE PLUS Silver Gold może w znacznym stopniu rozwiązać podstawowy problem leczenia endodontycznego, jakim są bakterie bytujące w kanałach korzeni zębów, dając skuteczny i długotrwały podkład pod dalsze wypełnienia kanałów zębowych.”

prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka
Zakład Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi



„Płyn NANOCARE PLUS Silver Gold stworzył zupełnie nowe możliwości rozwiązywania problemów w endodoncji.

Efekty kliniczne w zwiększeniu skuteczności leczenia endodontycznego przewyższają wszystkie znane mi do tej pory preparaty.”

lek. med. Roman Borczyk

„Nie wiedziałam, że w tak prosty sposób można poprawić wynik leczenia przewodowego. Płyn NANOCARE PLUS Silver Gold zmniejszył ilość powikłań po leczeniu kanałowym u ponad 1/3 moich pacjentów.”

lek. stom. Janina Pacyga

„Łatwo, bezpiecznie i skutecznie, tak oceniam efekty działania preparatu NANOCARE PLUS Silver Gold.”

lek. stom. Piotr Ogniewski